



Gebrauchsanweisung


Nutzen Sie das Rückenpolster für die
Simulation der Rückenschläge

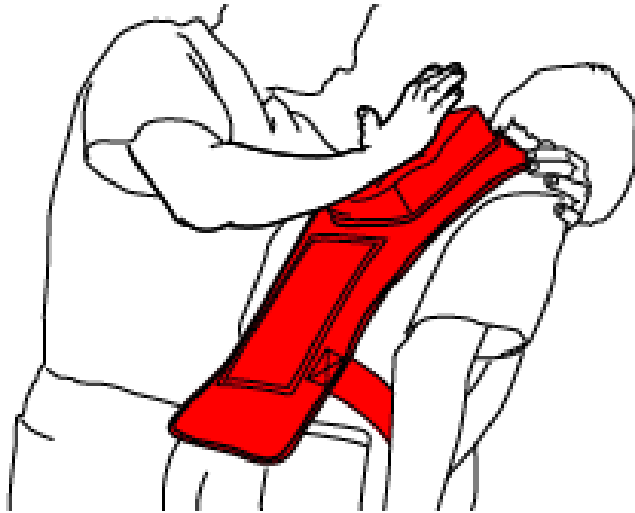

Legen Sie vor der Übung einen
Schaumstoffstopfen ein.

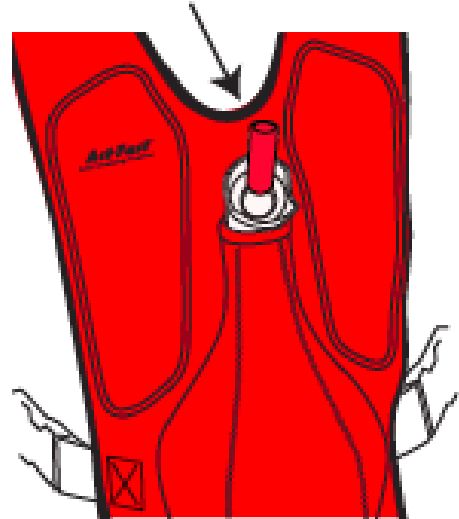

Umfassen Sie den Patienten und legen Sie die geballte Faust auf den Bauch des Patienten,
zwischen Bauchnabel und Rippenbogen, legen Sie nun die freie andere Hand über Ihre Faust.

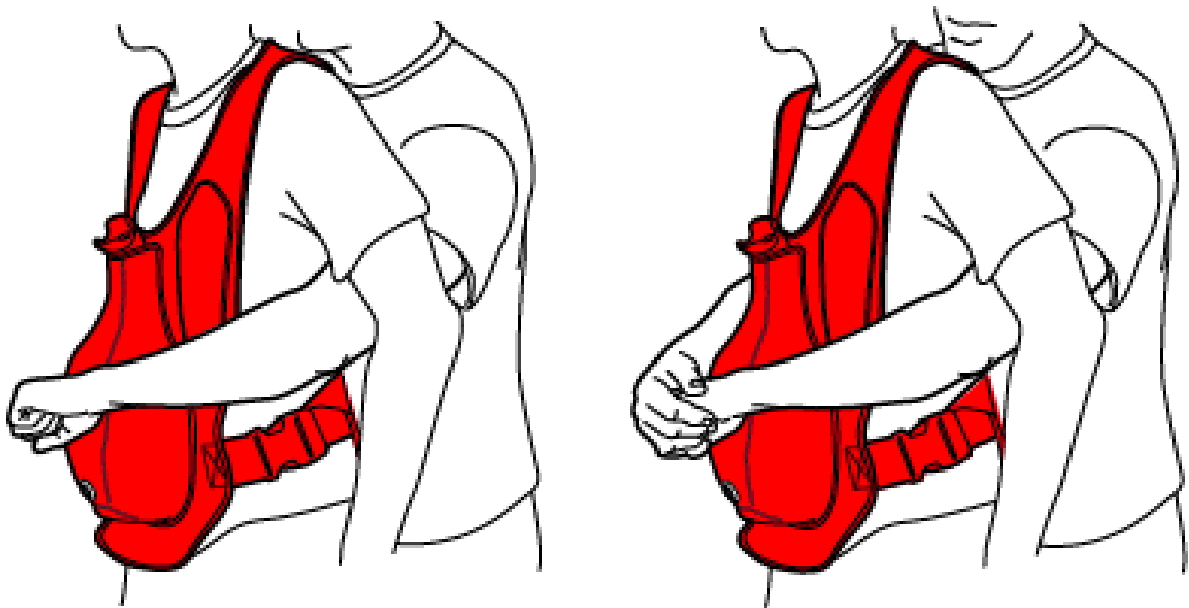

www.med1plus.de/ info@med1plus.de

med1plus

Gebrauchsanweisung

Führen Sie nun eine schnelle nach oben und innen gerichtete Bewegung durch, um den Druck im Brustkorb zu erhöhen und den Fremdkörper zu entfernen.

Wird die Bewegung richtig ausgeführt, fliegt der Schaumstoffstopfen aus dem Act+Fast Trainer heraus. Bitte beachten Sie, dass dabei niemals auf Personen gezielt werden darf.




Reinigung des Act+Fast Trainers

www.med1plus.de/ info@med1plus.de

med1plus

Gebrauchsanweisung

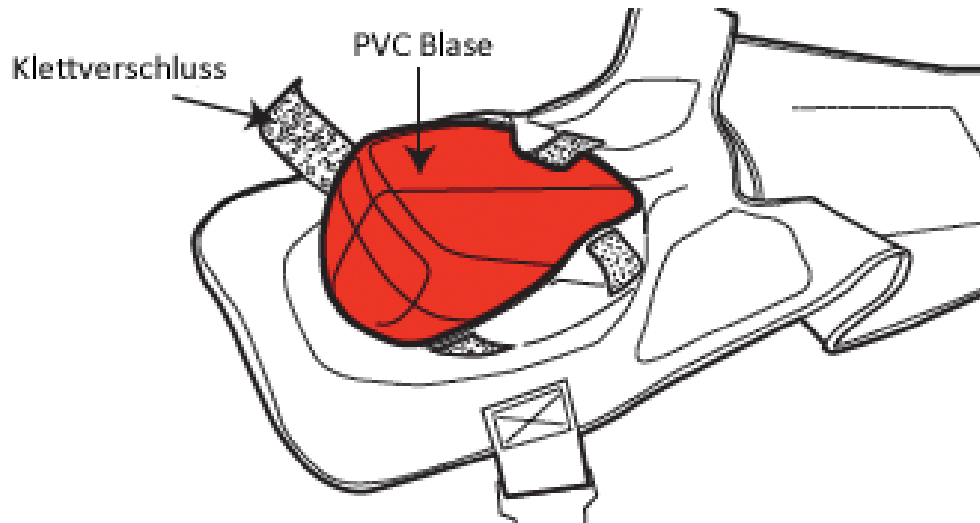

Entnehmen Sie die PVC Blase des Trainers über die Innenseite.
Anschließend können Sie den Trainer mit einer milden Seifenlösung reinigen.

www.med1plus.de/ info@med1plus.de

med1plus

Gebrauchsanweisung



www.med1plus.de/ info@med1plus.de

med1plus

Gebrauchsanweisung



Das Set beinhaltet die folgenden Bestandteile:

Act+Fast Neopren Weste in rot, PVC Blase, durchsichtiger PVC Atemweg,
10 Schaumstoff – Stifte, Gebrauchsanweisung und eine Tragetasche

Hersteller: ActFast Medical LCC, USA

Importeur / Vertrieb: med1plus GmbH, Deutschland

Hergestellt in der VR China
Zusammengesetzt in den USA

www.med1plus.de/ info@med1plus.de

med1plus