

RESC ASSIST[®]
EINFACH RICHTIG HELFEN

**SYSTEME FÜR DIE SCHNELLSTE
UND BESTE ERSTE HILFE**



LEBEN ODER TOD

DIE ERSTEN 15 MINUTEN ENTSCHEIDEN

WARUM WIR EIN NEUES ERSTE-HILFE- UND RETTUNGSSYSTEM BRAUCHEN

Bei der ersten Hilfe spielt die Zeit eine entscheidende Rolle – während man früher von der „goldenen Stunde“ sprach, geht man heute von der „Platin-Viertelstunde“ aus, die oft über Leben und Tod entscheidet.

Da ist es fatal, wenn ein Ersthelfer lange nach dem Verbandskasten oder nach den richtigen Hilfsmitteln suchen muss. Noch schlimmer ist es, wenn er sich aus Unkenntnis oder Angst vor „falscher“ Hilfe und deren Konsequenzen nicht traut, aktiv zu werden. Wer dann nur den Notruf alarmiert und auf den Rettungsdienst wartet, verschwendet wertvolle Zeit. Deshalb hat

Resc-Q-assist ein neues Erste-Hilfe- und Rettungssystem entwickelt, das Ersthelfern klare und genaue Anweisungen gibt, was zu tun ist. Eine einfache Diagnosehilfe kombiniert mit kurzen, verständlichen Handlungsanweisungen und ein Erste-Hilfe-Koffer mit einem Wegweisersystem. Damit kommt jeder Ersthelfer sofort zurecht und vor allem: er verliert die Angst vor der eigenen Hilflosigkeit – er traut sich, selbst Hilfe zu leisten und Leben zu retten.

SO DARF ES NICHT WEITERGEHEN

Tausende Verletzte sind schon gestorben, weil die Umstehenden sich nicht entscheiden konnten, aktiv Hilfe zu leisten. Die Hochrechnung einer Umfrage aus dem Jahr 2002 ergab, dass praktisch jeder Angst hat, helfen zu müssen und es nicht zu können. 35 Millionen Deutsche hätten Bedenken, überhaupt Erste Hilfe zu leisten. Und 25 Millionen davon würden es gar nicht tun, sondern warten, bis ein Anderer hilft.

DAHINTER STECKT KEIN BÖSER WILLE, sondern die immense Angst, die Situation zu verschlimmern und dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden. Aus rein juristischer Sicht ist das praktisch unmöglich. Viel realer ist die Möglichkeit, für unterlassene Hilfeleistung vor Gericht zu kommen.

Das Resc-Q-assist Erste-Hilfe- und Rettungssystem befreit den Ersthelfer von seiner Angst:



durch einfache Kriterien nimmt es ihm bei der Diagnose viel Verantwortung ab. Es erlaubt ihm, klaren Anweisungen zu folgen. Und es zeigt ihm mit einem Farbleitsystem den Weg zu den richtigen Hilfsmitteln, die er nur noch wie gezeigt einsetzen muss.



RESC-Q-BOX Q100

DIE WICHTIGE HILFE FÜR DEN ERSTHELFER

WENIGER ANGST, MEHR ORIENTIERUNG

Das neue Resc-Q-assist Q100 Erste-Hilfe- und Rettungssystem ist viel mehr als ein Verbandskasten: Es ist der erste Erste-Hilfe-Koffer, der sich in die Situation des unerfahrenen Ersthelfers hineinversetzt und ihm das Know-how sowie die Sicherheit eines erfahrenen Retters ermittelt. Dazu besitzt der Q100 zwei Beigaben, die psychologische Barrieren überwinden und schnelle Hilfe ermöglichen.

ERSTENS DIE EINZIGARTIGE RESC-Q-DISK, die dem Ersthelfer genau sagt, was bei wel-

chem Notfall zu tun ist. Diese Drehscheibe zeigt verschiedene Arten von Verletzungen und die entsprechenden Maßnahmen sowie die Farbe der Hilfsmittel, die man einsetzen muss.

ZWEITENS DIE FARBEN IM KOFFER – sie leiten den Ersthelfer zu den richtigen Hilfsmitteln, die in entsprechende Fächer eingepackt sind. Diese Fächer sind zusätzlich mit Buchstaben beschriftet, damit auch Menschen mit Sehbehinderungen zuverlässig den korrekten Weg finden.

**BIS ZU 25% SCHNELLER,
FAST 100% RICHTIGER***



SO FUNKTIONIERT DAS RESC-Q-ASSIST SYSTEM:



1 Sofort beim Öffnen des Koffers erblickt der Ersthelfer die hilfreiche Resc-Q-disk



2 Auf der Drehscheibe erkennt man die Icons der verschiedenen Verletzungstypen



3 Wer den Pfeil auf der Drehscheibe zum Icon der Verletzung bewegt, sieht Farbfelder und Maßnahmen



4 Die Farben der Felder leiten den Helfer zu farbi- gen Fächern mit den richtigen Hilfsmitteln

*Ein Betriebstest der Rurtalwerkstätten Düren gGmbH – Lebenshilfe Düren 2010 ergab, dass unerfahrene Helfer mit diesem System bis zu 25% schneller und fast 100% sicherer und fehlerfreier Hilfe leisten können.

Q100 KOFFERINHALT

FÜR ALLE WICHTIGEN FÄLLE GERÜSTET

HOHE KOFFER-QUALITÄT

Für medizinische Geräte, Arzneimittel und Lebensmittel zugelassener Koffer aus ABS-Kunststoff. Formbeständig, schlagfest, temperaturbeständig, spritzwassergeschützt und staubdicht, regeneratfrei, mit cadmiumfreier Einfärbung. Fünf Jahre Herstellergarantie auf bewegliche Funktionsteile und Farbgleichheit.

DAUERHAFTES VERBANDMATERIAL


Befüllt nach Industrie Norm mit 5 Jahren Haltbarkeit. Sterile Verbandstoffe mit CE-Kennzeichnung, Herstellungsdatum und 5 Jahren Haltbarkeit – so können sie sehr lange gebraucht werden, aufwändige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen.

WANDHALTERUNG

Mit den handlichen Griffkappen kann der Koffer schnell entnommen werden. Aber dank der 90°-Stopp-Arretierung lässt er sich auch an der Wandhalterung öffnen.

BARRIEREFREIHEIT

Die Farben auf der RescQ-Disc und den Kofferfächern sind durch Buchstaben ergänzt, sodass sich auch Farbenblinde sofort zurecht finden.

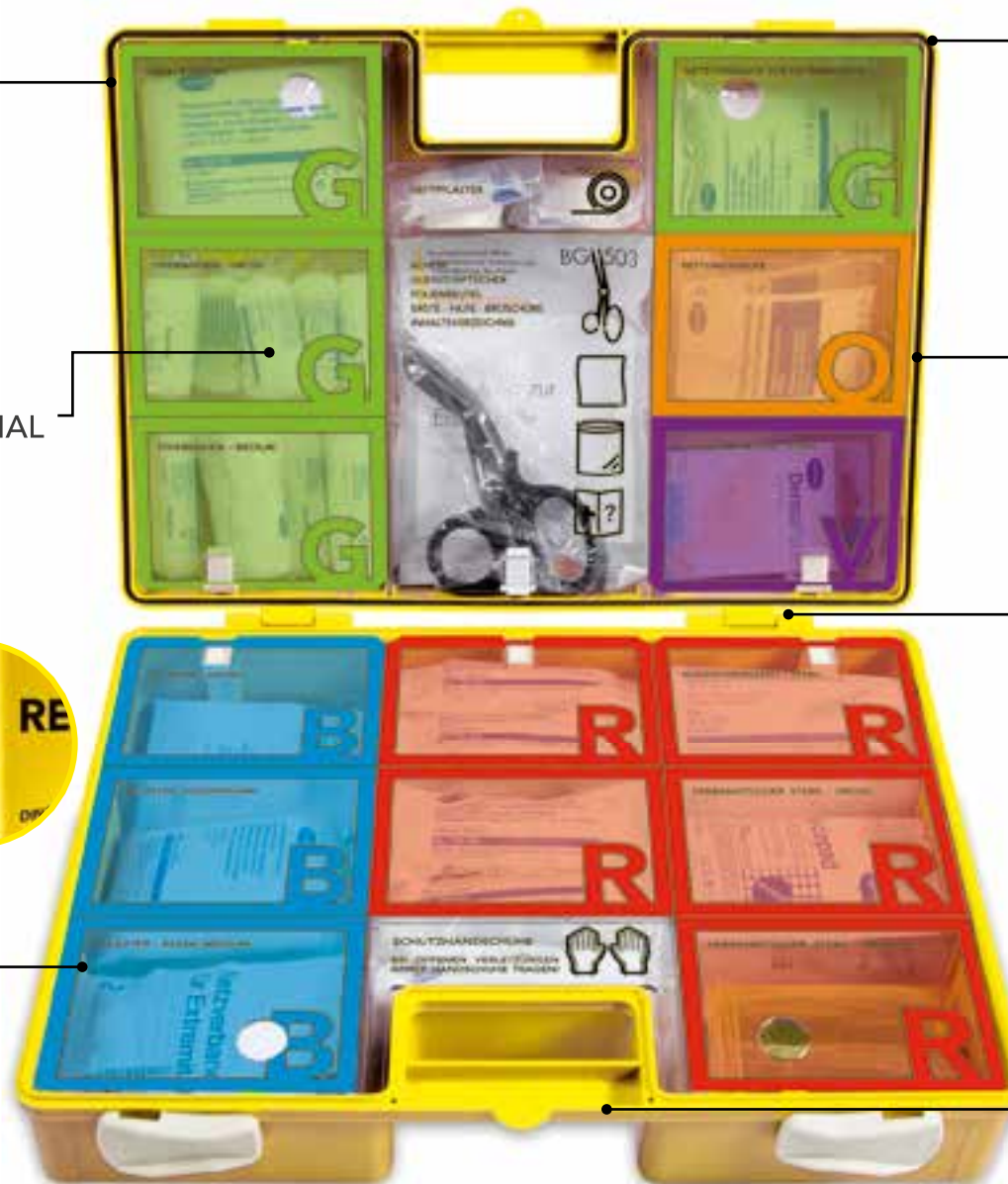

SICHERES DESIGN

Es gibt keine scharfen Ecken oder Kanten, alle Bauteile sind aus hochwertigem, festem und abgerundetem ABS-Kunststoff

SCHUTZ UND HANDLING

Eine umlaufende Gummidichtung schützt die nach DIN 13 169 genormte Befüllung. Leichtgängige, aber fest schliessende Drehverschlüsse sichern den schnellen Zugang.

ZWEI GRÖSSEN

Resc-Q-assist bietet das Erste-Hilfe-System in zwei Koffergrößen an: Q50 für bis zu 50 Personen und Q100 für bis zu 100 Personen.

GRIFFE

Der speziell verstärkte Tragegriff garantiert eine schnelle Entnahme aus der Wandhalterung und den sicheren Transport zum Notfallort.

DIE RESC-Q-BOX SERIE

PASSENDE LÖSUNGEN FÜR INDIVIDUELLE ANFORDERUNGEN

AB 50 MITARBEITER



Q100

Resc-Q-Box: ABS-Kunststoff, temperaturbeständig, schlagfest, formbeständig, staubdicht, spritzwassergeschützt, wartungsfrei, transparente Abdeckplatten, leichtgängige Drehverschlüsse, Plombier Vorrichtung. Lieferumfang: Füllung nach DIN 13 169, Resc-Q-Assist Farbleitsystem, Resc-Q-Disk, Wandhalterung

Q 440 x 330 x 150 mm

BIS 50 MITARBEITER



Q50

Resc-Q-Box: ABS-Kunststoff, temperaturbeständig, schlagfest, formbeständig, staubdicht, spritzwassergeschützt, wartungsfrei, transparente Abdeckplatten, leichtgängige Drehverschlüsse, Plombier Vorrichtung mit Sicherheitsplombe.

Lieferumfang: Füllung nach DIN DIN 13157, Resc-Q-Assist Farbleitsystem, Resc-Q-Disk, Wandhalterung

Q 280 x 210 x 115 mm

ERHÄLTICHE FARBEN

Sie erhalten den Koffer des Resc-Q-assist Erste-Hilfe- und Rettungssystems in vielen Farben – etwa passend zu Ihren Unternehmensfarben oder in Signalfarbe.



Gelb(GE)

Signalgrün(SG)

Blau(BL)

Signalorange(OR)

Weiß(WE)

INDIVIDUELLE DESIGNS UND FÜLLUNG

Als Standard sind verschiedene Sprachen und Symbole verfügbar. Auf Wunsch lässt sich auch ein individueller Aufdruck realisieren. Sprechen Sie uns an!



BERATUNG ODER BESTELLUNG?

KOSTENLOSES BERATUNGSGESPRÄCH VEREINBAREN:

HOTLINE: +49 (0)6238-9846810

E-MAIL: INFO@ESE-INT.NL

RESC-Q-ASSIST

WER DAHINTER STECKT

ESE INTERNATIONAL

ESE International hat die richtige Lösung auf dem Gebiet von Evakuierung, Arbeitsschutz und Erste Hilfe.

ESE International ist Komplettanbieter auf dem Gebiet von Evakuierungs, Arbeitsschutz und Erste Hilfe. Durch unsere Kenntnisse der jetzigen und potenziellen Märkten, sind wir in der Lage Ihnen eine passende Lösung zu bieten.

Durch die eigene Produktion von Verbandsmitteln(Quick), Verbandskästen, Rucksäcken, Aufbewahrungsschränke, Tragen, Arbeitskleidung und Importeursrechte vom Evac+Chair, und Plum können wir Ihnen eine hohe Qualität gegen faire Preise liefern!



DER AUFFÜLL-EXPRESS

WIR KÜMMERN UNS DRUM!

In einer Hinsicht ist ein Resc-Q-Box wie jeder andere Verbandkasten: im Notfall soll er mit noch verwendbaren Hilfsmitteln vollständig gefüllt sein.

Auf Wunsch ergänzen sie den Inhalt um zusätzliches Erste-Hilfe-Material wie Taschenmasken (zur Beatmung), Augenspülflaschen oder auch Kältekompressen. Ihre Mitarbeiter werden von solchen Aufgaben entlastet und Sie sparen sich überflüssige oder fehlerhafte Anschaffungen.

HIERZU MACHEN WIR IHNEN GERNE EIN INDIVIDUELLES ANGEBOT.

Ausserdem bieten wir zur Selbstbefüllung folgende Nachfüllsets an:

- Komplettfüllung Q100
- Komplettfüllung Q50
- Füllung Steril Q100
- Füllung Steril Q50

**WEITERE INFORMATIONEN
RUND UM DAS AUFFÜLLEN
IHRER RESC-Q-BOX ERHALTEN
SIE HIER:**

TELEFON: +49 (0)6238-9846810

FAX: +49 (0)6238-9846835

E-MAIL: INFO@ESE-INT.NL



RESC ASSIST®

Habraken 2331
5507 TK Veldhoven - Niederlande
Telefon: +49 (0)6238-9846810
Fax: +49 (0)6238-9846835
E-Mail: info@ese-int.nl

www.ese-int.de

